

Døgnbehandling via PEG/J



(24-timers behandling)

Kort brukerveiledning ved døgnbehandling (24-timers behandling) via PEG og intestinalsonde.
En medisinkassett kan kun brukes i opptil 24 timer når den er tatt ut av kjøleskapet.

Morgenprosedyre



A. Koble fra nattpumpe og skylle sondesystemet

1. Hold inne **START/STOPP**-knappen til (--- --- ---) forsvinner for å stoppe den kontinuerlige infusjonen. Det står **STOPPET** i displayet.
2. Hold inne **PÅ/AV**-knappen til (••• ••• •••) forsvinner for å slå av pumpa.
3. Koble kassettslangen fra intestinalsonde-koblingen på PEG/J sonden (drei på kassettslangen, ikke på PEG/J sonden).
4. Koble en ww-adapter til intestinalsonde-koblingen på PEG/J sonden.
5. Benytt en 20 ml sprøyte og skyll med minimum 20 ml kranvann.
6. Skyll også sideporten/sondemellomrommet ved å benytte en WW-adapter og skyll med minimum 20 ml kranvann.
7. Koble kassetten fra nattpumpa.

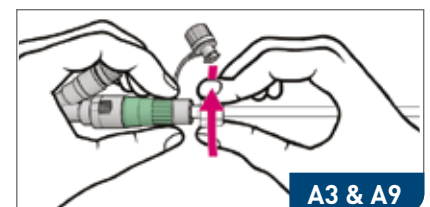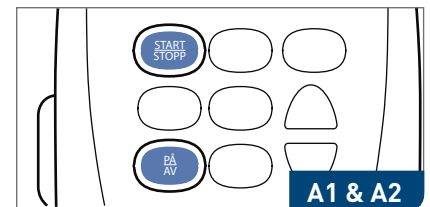

Koble til dagpumpe

8. Ny legemiddelkassett kobles til dagpumpa. Plasser pumpa i bærestyret og fest dette forsvarlig på pasienten.
9. Fjern den røde beskyttelsesproppen fra kassettslangen og koble kassettslangen kassettslangen til intestinalsonde-koblingen på PEG/J sonden (drei på kassettslangen, ikke på PEG/J sonden).
10. Start pumpa ved å holde inne **PÅ/AV**-knappen til tekst vises i displayet. Pumpa gjør en selvtest i ca. 30 sekunder. **STOPPET** vises i displayet.
11. Hold inne **START/STOPP**-knappen til (--- --- ---) forsvinner for å starte den kontinuerlige dosen igjen. **INF** vises i displayet når den kontinuerlige dosen gis.
12. Trykk **MORGENDOSE**-knappen to ganger for å gi morgendosen. Etter at morgendosen er gitt vil pumpa automatisk gi den kontinuerlige dosen. Det står **INF** i displayet.

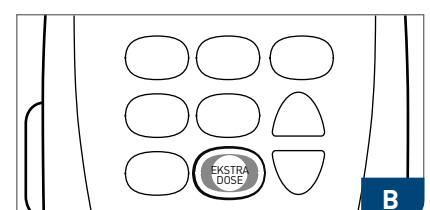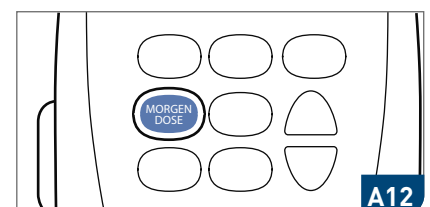



B. Ved behov for ekstradose

Trykk **EKSTRADOSE**-knappen en gang (to «pip» høres).
Det står **BOLUS** i displayet. Etter at ekstradosen er gitt vil pumpa automatisk gi den kontinuerlige dosen. **INF** vises i displayet

Kveldsprosedyre

C. Bytte fra dagpumpe til nattpumpe

1. Hold inne **START/STOPP**-knappen til (••• ••• •••) forsvinner for å stoppe den kontinuerlige infusjonen på dagpumpe. Det står **STOPPET** i displayet.
2. Hold inne **PÅ/AV**-knappen til (--- --- ---) forsvinner for å slå av pumpa.
3. Koble kassettslangen fra intestinalsonde-koblingen på PEG/J sonden (drei på kassettslangen, ikke på PEG/J sonden). Fjern kassetten fra dagpumpe.
4. Legemiddelkassett kobles til nattpumpe. Benytt kassetten fra dagpumpe om det er tilstrekkelig medisin til natten, eller hent en ny medisinkassett fra kjøleskapet. En medisinkassett er holdbar i opptil 24 timer i romtemperatur. Koble kassettslangen til intestinalsonde-koblingen på PEG/J sonden (drei på kassettslangen, ikke på PEG/J sonden). Plasser pumpa i bærestyret og fest dette forsvarlig på pasienten.
5. Start pumpa ved å holde inne **PÅ/AV**-knappen til tekst vises i displayet. Pumpa gjør en selvtest i ca. 30 sekunder. **STOPPET** vises i displayet.
6. Hold inne **START/STOPP**-knappen til (--- --- ---) forsvinner for å starte den kontinuerlige dosen igjen. **INF** vises i displayet når den kontinuerlige dosen gis.

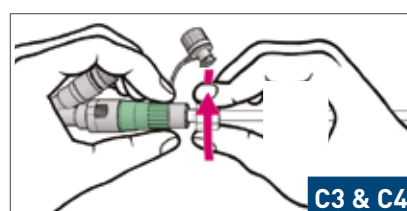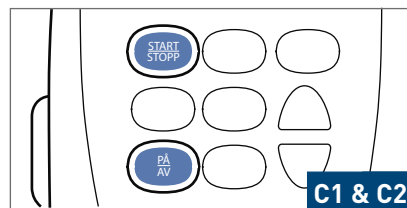

OBS: Dersom pasienten får sondemat må sideporten/sondemellomrommet skylles etter den har vært brukt til matning.