

Dagbehandling via nasojejunal sonde

(16-timers behandling)

Kort brukerveiledning for behandling på dagtid (16-timers behandling) med Duodopa® via nasojejunal sonde.


Morgenprosedyre

A. Koble til medisinen og starte pumpa

1. Ny legemiddelkassett kobles til pumpa.
2. Fjern den røde beskyttelsesproppen fra kassettslangen.
3. Koble kassetten til forlengelsesslangen.
4. Ha pumpa i en veske og fest denne forsvarlig på pasienten.
5. Koble forlengelsesslangen til den nasojejunale sonden. Se til at alle klemmer er åpne.
6. Hold inne **PÅ/AV**-knappen i tre sekunder for å starte pumpa.
7. Hold inne **START/STOPP**-knappen til (--- --- ---) forsvinner for å starte den kontinuerlige dosen. **INF** vises i displayet.




A1

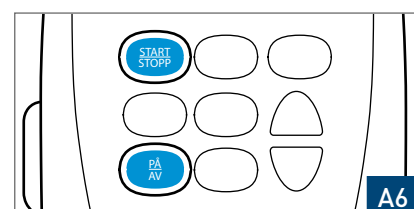

A6

B. Administrere en morgendose

Trykk **MORGENDOSE**-knappen to ganger for å gi morgendosen. Etter at morgendosen er gitt vil pumpa automatisk gi den kontinuerlige dosen.

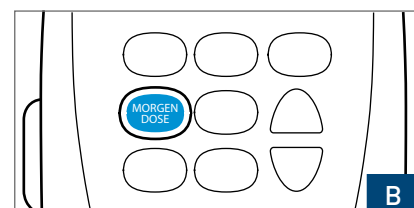


B

Prosedyre gjennom dagen

C. Administrere en ekstradose

Trykk **EKSTRADOSE**-knappen en gang (to "pip" høres). Etter at ekstradosen er gitt vil pumpa automatisk gi den kontinuerlige dosen.

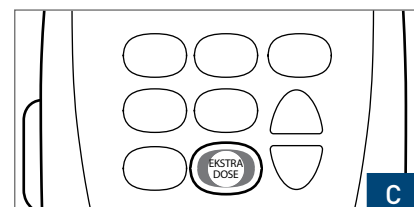


C

Kveldsprosedyre

D. Avslutte behandlingen og slå av pumpa

1. Hold inne **START/STOPP**-knappen til (--- --- ---) forsvinner for å stoppe medisineringsen.
2. Hold inne **PÅ/AV**-knappen til (••• ••• •••) forsvinner for å slå av pumpa.
3. Koble forlengelsesslangen fra nesesonden.
4. Koble forlengelsesslangen fra kassettslangen.
5. Koble kassetten fra pumpa.

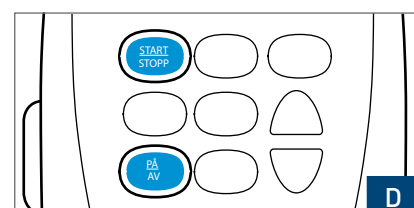

D

AbbVie™ NJ (nasojejunal sonde) inneholder 5 ml (100 mg levodopa) og må derfor ikke skylles.

