









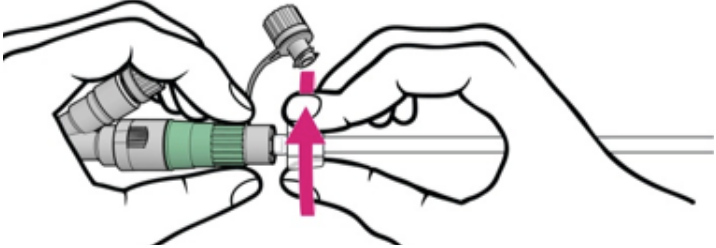






# Starte behandlingen etter PEG-operasjon


Når behandlingen med Duodopa skal starte etter at PEG og intestinalsonde er på plass brukes **EKSTRADOSE** til å fylle sonden, 3 ml (ikke bruk morgendosen, da denne har en tidslås på 20 timer). Fra neste dag må morgendosen økes med 3 ml for å fylle sonden.

1		Hold inne <b>PÅ/AV</b> i tre sekunder til tekst vises i displayet. Pumpa gjør en selvtest. Dette tar ca 30 sekunder. <b>STOPPET</b> vises i displayet når selvtesten er ferdig.
2		Trykk på <b>NESTE</b> -tasten flere ganger til <b>Ekstradose X,X ml</b> vises i displayet (3 ml for å fylle sonden + ekstradosen pasienten evt. bør få ved oppstart).
3		Endre dose ved hjelp av piltastene til ekstradose ved oppstart er oppnådd.
4		Bekreft doseendringen ved å trykke på <b>BEKREFT/SLETT</b> .
5		Hold inne <b>START/STOPP</b> til {---- ---- ----} forsvinner. Pumpa går gjennom/viser de innstilte verdiene. Det tar ca 15 sekunder. Det står nå <b>INF</b> i displayet.
6		Trykk <b>EKSTRADOSE</b> . To "pip" høres. <b>BOLUS</b> vises i displayet – ekstradosen gis. Pumpa går automatisk tilbake til å gi kontinuerlig infusjon når ekstradosen er gitt. <b>INF</b> vises igjen i displayet.
7		<b>Når ekstradose ved oppstart er gitt må pumpas ekstradose tilbakestilles til ordinær ekstradose.</b>
8		Hold inne <b>START/STOPP</b> til {---- ---- ----} forsvinner. <b>STOPPET</b> vises i displayet. Pumpa er stoppet og gir ikke infusjon.
9		Endre ekstradosen til den ordinære ved hjelp av piltastene.
10		Lagre den endrede verdien.
11		Hold inne <b>START/STOPP</b> til {---- ---- ----} forsvinner. Pumpa går gjennom/viser de innstilte verdiene. Det tar ca 15 sekunder. <b>INF</b> vises i displayet. Pumpa gir medisin.




## Hurtig-guide: Daglige rutiner ved PEG

1		<p>Koble pumpa med legemiddelkassett til sonden. Ikke vri på PEG-sonden, vri på kassettslangen.</p> 
2		<p>Fest pumpa forsvarlig i en veske eller i en bæresele og fest den på pasienten. Hold inne <b>PÅ/AV</b> i tre sekunder til tekst vises i displayet. Pumpa gjør en selvtest. Dette tar ca 30 sekunder. <b>STOPPET</b> vises i displayet når selvtesten er ferdig.</p>
3		<p>Hold inne <b>START/STOPP</b> til [---- ---- ----] forsvinner. Pumpa går gjennom/viser de innstilte verdiene. Det tar ca 15 sekunder. Det står nå <b>INF</b> i displayet. Pumpa gir nå den kontinuerlige dosen.</p>
4		<p>Trykk <b>MORGENDOSE</b>. Den innstilte morgendosen vises.</p>
5		<p>Trykk <b>MORGENDOSE</b> igjen. Dosen gis og i displayet vises nedtelling av dosen. Pumpa gir deretter den kontinuerlige dosen. <b>INF</b> vises igjen i displayet.</p>

## Gi ekstra dose

1		<p>Pumpa er <b>STARTET</b>. <b>INF</b> vises i displayet.</p>
2		<p>Trykk <b>EKSTRA DOSE</b>. To "pip" høres. <b>BOLUS</b> vises i displayet – ekstradosen gis. Pumpa går automatisk tilbake til å gi kontinuerlig infusjon når ekstradosen er gitt. <b>INF</b> vises igjen i displayet.</p>

## Kveld: Stenge og koble fra pumpa

1		Hold inne <b>START/STOPP</b> til {---- ---- ----} forsvinner. <b>STOPPET</b> vises i displayet. Pumpa er stoppet og gir ikke medisin.
2		Hold inne <b>PÅ/AV</b> til {•••• •••• ••••} forsvinner.
3		Koble pumpa med legemiddelkassett fra sonden. Ikke vri på PEG-sonden, vri på kassettslangen.
4		Skyll intestinalsonden som inneholder medisin. Benytt en 20 ml sprøyte og skyll med vanlig drikkevann, minimum 20 ml. Benytt en ww-adapter mellom sprøyte og sonde.
5		En medisinkassett kan brukes i opp til 24 timer etter at den er tatt ut av kjøleskapet. Legg pumpen lett tilgjengelig til neste morgen.

